




ROTOLAVIT II

Uso amigable para las
soluciones en serología

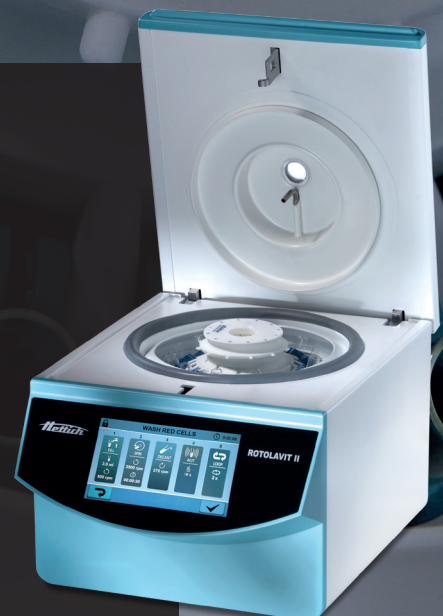

LA NUEVA ROTOLAVIT II CENTRÍFUGA PARA LAVADO DE CÉLULAS

- Desarrollada a partir de sus requerimientos específicos

El sistema de lavado de células ROTOLAVIT II facilita las tareas rutinarias en laboratorios de transfusión. Además de las pruebas de antiglobulina, el ROTOLAVIT II es también utilizada para la búsqueda y diferenciación de anticuerpos. Este dispositivo se caracteriza por su alto rendimiento celular ahorrando tiempo comparado con el método manual.

Al proporcionar resultados fiables y consistentes en todas las áreas de aplicación, se utilizó toda la experiencia y retroalimentación de los clientes del modelo anterior. El modelo actual establece nuevos estándares en utilización y personalización.



Estamos impresionados del nuevo diseño de la ROTOLAVIT II por la versatilidad y facilidad de uso, estamos completamente satisfechos con la calidad.



Banco de sangre Inter Regional SRK, Berna, Suiza.


- Buenas razones para seleccionar la ROTOLAVIT II:

- 1 Innovación que puedes tocar**
Con su enorme pantalla táctil, la ROTOLAVIT II establece un nuevo nivel de facilidad de uso, aun utilizando guantes.
- 2 Configuración flexible para todas las necesidades del usuario**
Elevada capacidad de configuración debido al gran espacio de memoria para programas propios.
- 3 Ahorro de tiempo en el laboratorio**
Velocidad máxima de 3.500 RPM, la centrífuga lavadora es una de las mas veloces del mercado. Esto acelera el proceso en el laboratorio y su eficiencia.
- 4 Seguridad a través de grupos de usuarios**
Con la idea de evitar cambios sin autorización o accidentales, funciones como calibración del instrumentos son solo accesibles para usuarios seleccionados.
- 5 Operación silenciosa**
Bajo nivel de ruido de solo 49 dB (A), a ROTOLAVIT II es silenciosa e invaluable en el laboratorio.

EL NUEVO ESTÁNDAR EN FACILIDAD DE OPERACIÓN

- 24 programas independientes fácilmente manejables

Hasta 24 programas diferentes, la ROTOLAVIT II puede ser usada en un amplio rango de aplicaciones en el laboratorio. Los programas en si mismos se pueden recuperar y comenzar en solo unos clics. Además, los detalles requeridos durante un ciclo de trabajo se muestran claramente.

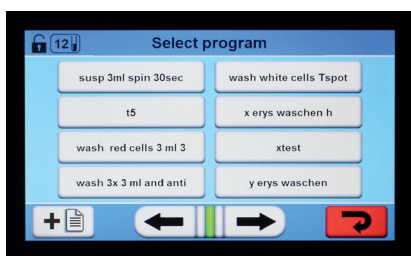

Programa general



Detalles del programa




Inicio de Programa

- Fácil configuración de los nuevos programas


La ROTOLAVIT II permite una edición detallada de los programas con la idea de adaptarse perfectamente a cada operación en su laboratorio. Hasta 20 procesos individuales por programa pueden ajustarse y vincularse como bloques de construcción. En caso de ser requerido, los ajustes como intensidad de brillo y volumen de alarma pueden ser personalizados.




Crear nuevo programa

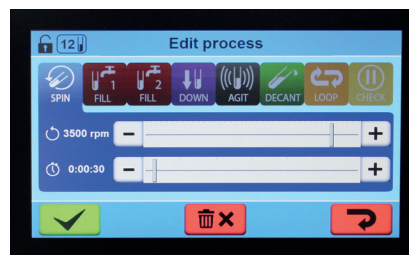

Editar proceso

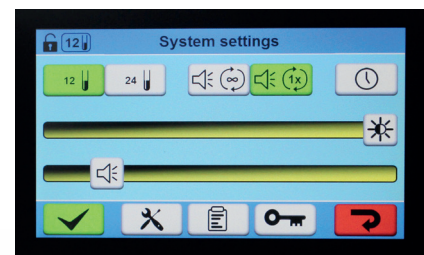


Ajuste de configuración de sistema

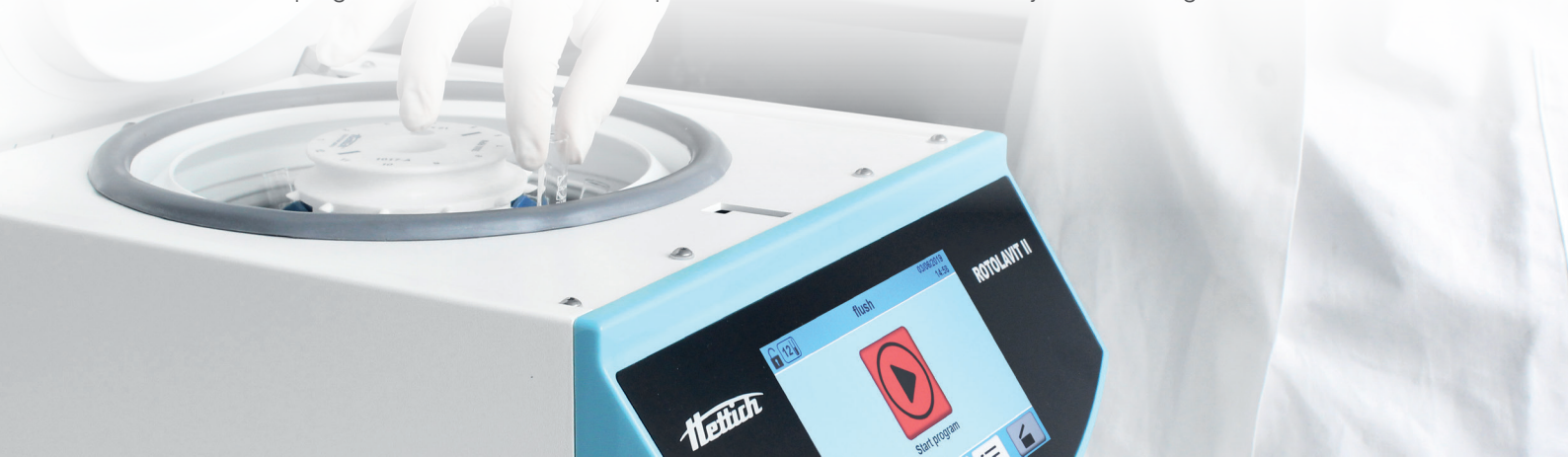

DATOS TÉCNICOS

ROTOLAVIT II	
Tensión nominal *)	100 – 240 V 1 ~
Frecuencia	50 – 60 Hz
Valor de conexión	144 VA
Emisión, Resistencia a las interferencias	EN / IEC 61326-3-2 / FCC CFR47 parte 15, ed 2015-04-21 (e-CFR) clase B
Capacidad máx.	24 tubos estándar (10 x 75 mm o 12 x 75 mm)
RPM máx.	3,500 min ⁻¹
RCF máx.	1,438
Radio (ambos rotores)	105 mm
Dimensiones (An x P x A)	330 x 480 x 280 mm
Peso	aprox. 24.5 kg
Regulación de temp. en continuo	≤ 49 dB (A)
Nº referencia	1008-00
11 – 30 V 1 ~ / DC ʸ	1008-03
Valor de conexión	144 VA

— Rotor oscilante, 12 pos. | 1017-A

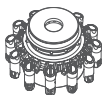


Rotor	
RPM máx. RCF máx.	3,500 min ⁻¹ 1,438
Capacidad máx.	12 x 5 ml
Escuadras Nivel de ruido máx.	45° 49 dB (A)
Nº referencia	1017-A

Recipientes	
Capacidad en ml	3 5
Ø x L en mm	10 x 75 12 x 75
RCF máx. ²⁾	1,438 1,438
Radio en mm	105 105
Nº referencia	Tubos²⁾

Adaptador	
Taladro Ø x L en mm	- -
Recipientes por rotor	12 12
Nº referencia	1019 (12 uds.) -

— Rotor oscilante, 24 pos. | 1018-A

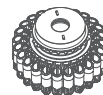

Rotor	
RPM máx. RCF máx.	3,500 min ⁻¹ 1,438
Capacidad máx.	24 x 5 ml
Escuadras Nivel de ruido máx.	45° 49 dB (A)
Nº referencia	1018-A

Recipientes	
Capacidad en ml	3 5
Ø x L en mm	10 x 75 12 x 75
RCF máx. ²⁾	1,438 1,438
Radio en mm	105 105
Nº referencia	Tubos²⁾

Adaptador	
Taladro Ø x L en mm	- -
Recipientes por rotor	24 24
Nº referencia	1019 (12 uds.) -

2) Los valores RCF indicados sólo se refieren al rendimiento de los rotores. La RCF máx. para los recipientes de centrifugación usados deberá consultarse a los fabricantes respectivos. Para los tubos de vidrio marcados con nota al pie de página 2) la RCF máx. es de 4.000.
El ROTOLAVIT II no está disponible en todos los países.